


FICHE PRODUIT

- * **Dénomination commune** : Aiguilles pour stylo injecteur doublement sécurisées
- * **Dénomination Commerciale:** Aiguilles VERIFINE DUO
- * **Classe de DM :** IIa
- * **Nomenclature Douanière :** 9018321000
- * **Code GMDN :** 18071
- * **Marquage CE:** 0197, Règlementation (UE) 2017/745
- * **Obtenu le :** 08/08/2023
- * **Date de déclaration ANSM:** 24/03/2021




DESCRIPTIF TECHNIQUE

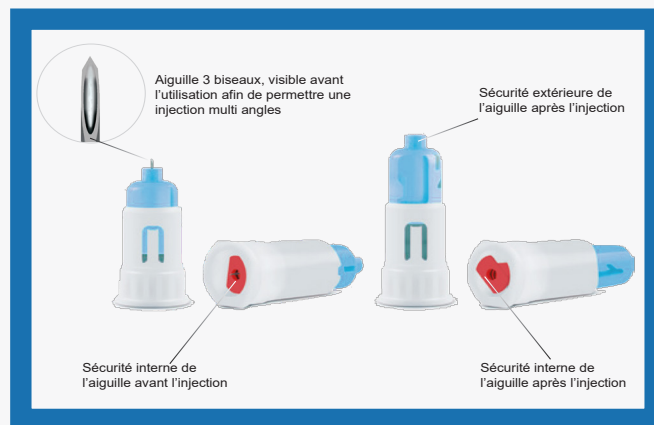


COMPOSITION DU DISPOSITIF

Aiguille	Acier Inoxydable AISI 304 Lubrifiant silicone
Corps et Opercule	Polypropylène / Pigments selon taille / Sans latex
Compatibilité	Compatible avec les principaux stylos du marché.
Dimensions	100mm X 360mm
Mode de stérilisation	Oxyde d'Ethylène
Péremption	5 ans


MODE D'EMPLOI

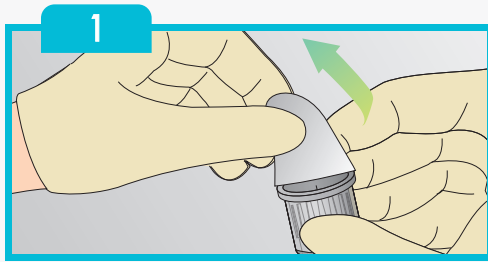


Retirez l'opercule de l'aiguille.

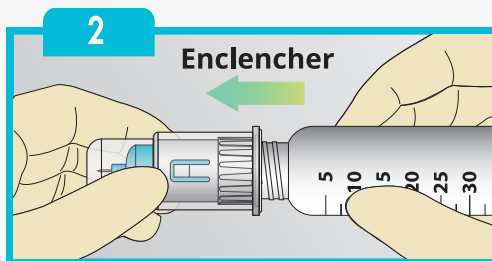


Enclenchez l'aiguille sur le stylo à insuline.

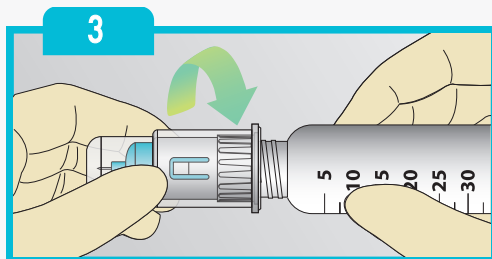


Vissez l'aiguille sur le stylo à insuline.

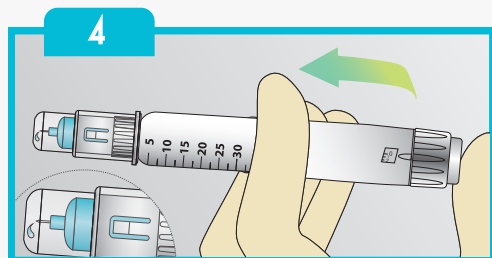

Purgez 2 unités.

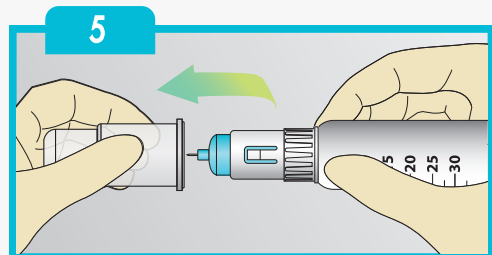


Retirez le capuchon de l'aiguille.

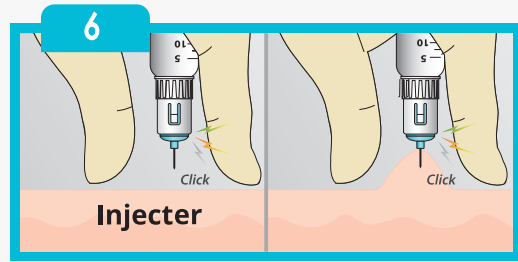


Piquez la peau avec ou sans pli selon la taille de l'aiguille utilisée.




Comptez 10 secondes après avoir appuyé sur le piston.

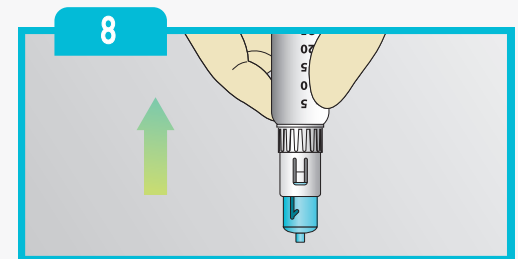

Retirez l'aiguille.

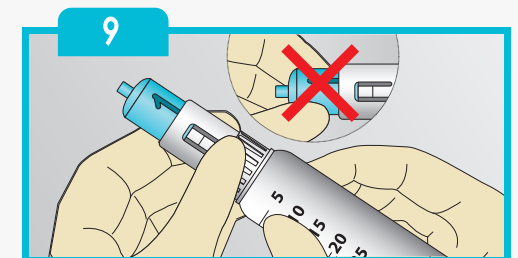



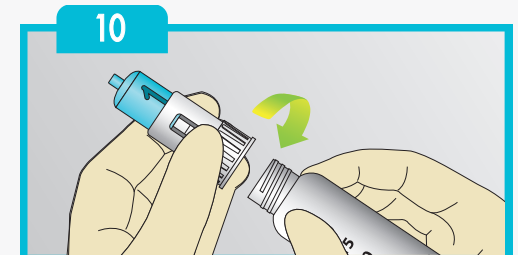

Dévissez l'aiguille du stylo injecteur



Jetez-la de façon sécurisée dans la boîte de déchets.

RÉFÉRENCES CATALOGUE

Couleur	Références	Taille	Code ACL
	VERIFDP431	4mm, 31G	6971227400833
	VERIFDP531	5mm, 31G	6971227400840
	VERIFDP630	6mm, 30G	6971227400819
	VERIFDP830	8mm, 30G	6971227400826

COMPATIBILITE AVEC TOUS LES STYLOS INJECTEURS

		INSULINE		
		Sanofi Aventis	ELI Lilly	Novo Nordisk
STYLOS INJECTEURS JETABLES PRÉREMPLIS				
	<p>Solostar :</p> <ul style="list-style-type: none"> • APIDRA • LANTUS • TOUJEO 	<p>KwikPen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • HUMALOG • UMULINE NPH • ABASAGLAR 	<p>FlexPen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Novomix <p>FlexTouch :</p> <ul style="list-style-type: none"> • NOVORAPID • LEVEMIR • TRESIBA • XULTOPHY 	
STYLOS INJECTEURS RÉUTILISABLES				
	<ul style="list-style-type: none"> • ClickSTAR • JuniorSTAR 	<ul style="list-style-type: none"> • HUMAPEN SAVVIO • HUMAPEN LUXURA HD 	<ul style="list-style-type: none"> • NOVOPEN 3/4 • NOVOPEN ECHO 	

ANALOGUE DU GLP-1

ASTRAZENECA	NOVO NORDISK
	
BYETTA	VICTOZA

DIMENSIONS ET COLISAGE

	Unité	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (Kg)
Boîte	100 Aiguilles	10	10	13	0,362
Carton	12 boîtes (1200 aiguilles)	31,5	22	28,5	4,5
Palette	864 boîtes (86400 aiguilles)	120	80	186	456

Importateur en France :

ALPHADIAB

381 Avenue Foch

78670, Villennes s/ Seine,

France.

Tel : 01 39 75 51 23

Fax : 01 85 47 05 04

Service client : contact@alphadiab.fr

Numéro vert gratuit : 0805 020 224

Fabricant :

PROMISEMED HANGZHOU MEDITECH CO.,LTD.

No. 1388 Cangxing Street, Cangqian Community,

Yuhang District, Hangzhou City, 311121 Zhejiang, P.R. China

Site : www.promisemed.ca

Représentant européen :

OBELIS S.A

Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium.MT