

FICHE PRODUIT

- * **Dénomination commune :** Aiguilles sécurisées pour stylo injecteur
- * **Dénomination Commerciale:** Aiguilles DROPSAFE
- * **Classe de DM :** IIa
- * **Nomenclature Douanière :** 9018321000
- * **Code GMDN :** 44127
- * **Marquage CE :** 0344, Directive 93/42/EEC
- * **Obtenu le :** 15/03/1999
- * **Réédité :** 01/09/2019
- * **Date de déclaration ANSM :** 24/09/2018



DESCRIPTIF TECHNIQUE



COMPOSITION DU DISPOSITIF

Aiguille	Acier Inoxydable AISI 304 (1.4301) Lubrifiant silicone
Corps et Opercule	Polypropylène Pigments selon taille
Compatibilité	Compatible avec les principaux stylos injecteurs.
Mode de stérilisation	Rayons Gamma Cobalt 60 (17,5 kGy)
Peremption	4 ans
Conditions de stockage	À conserver à l'abri de l'humidité et des rayons du soleil.

RÉFÉRENCES CATALOGUE

Couleur	Références	Taille	Code ACL
	DPSAFE5-31	5mm, 31G	5 907996 098583
	DPSAFE6-31	6mm, 31G	5 907996 091584
	DPSAFE8-31	8mm, 31G	5 907996 091591

COMPATIBILITE AVEC LES PRINCIPAUX STYLOS INJECTEURS

		INSULINE		
		Sanofi Aventis	ELI Lilly	Novo Nordisk
STYLOS INJECTEURS JETABLES PRÉREMPLIS				
	Solostar : <ul style="list-style-type: none"> • APIDRA • LANTUS • TOUJEO 	KwikPen : <ul style="list-style-type: none"> • HUMALOG • UMILINE • ABASAGLAR 	FlexPen : <ul style="list-style-type: none"> • Novomix FlexTouch : <ul style="list-style-type: none"> • NOVORAPID • LEVEMIR • TRESIBA • XULTOPHY 	
STYLOS INJECTEURS RÉUTILISABLES				
	<ul style="list-style-type: none"> • ClickSTAR • JuniorSTAR 	<ul style="list-style-type: none"> • HUMAPEN SAVVIO • HUMAPEN LUXURA HD 	<ul style="list-style-type: none"> • NOVOPEN 3/4 • NOVOPEN ECHO 	

ANALOGUE DU GLP-1

ASTRAZENECA	NOVO NORDISK
	
BYETTA	VICTOZA

MODE D'EMPLOI



1. Suivre le mode d'emploi.
2. Ne pas toucher l'embout coulissant avant l'injection. Toute pression appliquée sur l'embout coulissant peut provoquer un verrouillage automatique de l'aiguille afin d'éviter les piqûres.
3. L'aiguille pour stylo de sécurité ne peut être utilisée si l'indicateur rouge de verrouillage apparaît sur l'embout coulissant.
Cela indique que l'aiguille est verrouillée et qu'elle ne peut pas être réutilisée (image 8).
4. Toujours éliminer les aiguilles pour stylo de sécurité usées dans une boîte pour objets tranchants (image 10).

DIMENSIONS ET COLISAGE

	Unité	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (Kg)
Boîte	100 Aiguilles	19	9	9	0,398
Carton	20 boîtes (2000 Aiguilles)	46	38	19	8,65

Fabricant:
HTL-STREFA S.A.
ul. Adamowek 7, PL-95035
Ozorkow, Pologne

Distributeur en France:
ALPHADIAB
381 Avenue Foch
78670 Villennes s/ Seine,
France.
Tel : 01 39 75 51 23
Fax : 01 85 47 05 04
Service client : contact@alphadiab.fr
Numéro vert gratuit : 0805 020 224