

# FICHE PRODUIT

- \* **Dénomination commune :** Aiguilles sécurisées pour stylo injecteur
- \* **Dénomination Commerciale :** Aiguilles VERIFINE
- \* **Classe de DM :** IIa
- \* **Nomenclature Douanière :** 9018321000
- \* **Code GMDN :** 18071
- \* **Marquage CE :** 0197, Règlementation (EU) 2017/745
- \* **Obtenu le :** 08/08/2023
- \* **Date de déclaration ANSM :** 20/09/2018

## DESCRIPTIF TECHNIQUE




### COMPOSITION DU DISPOSITIF

Aiguille :	Acier Inoxydable AISI 304 Lubrifiant silicone
Corps et Opercule :	Polypropylène / Pigments selon taille
Compatibilité :	Compatible avec tous les stylos du marché.
Dimensions :	H 370mm X L 200mm
Mode de stérilisation :	Oxyde d'Éthylène
Peremption :	5 ans


# MODE D'EMPLOI




Retirez l'opercule de l'aiguille.

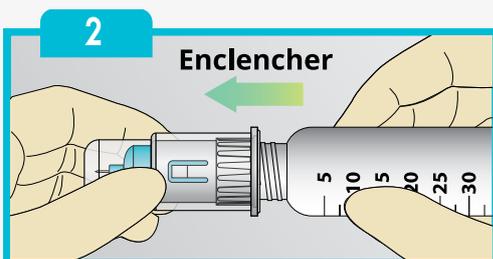


Enclenchez l'aiguille sur le stylo à insuline.

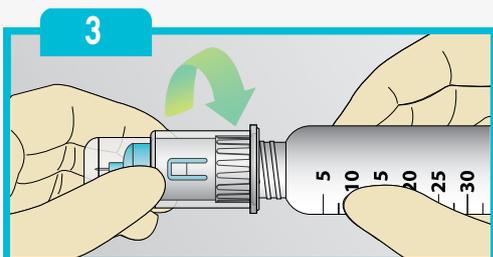


Vissez l'aiguille sur le stylo à insuline.

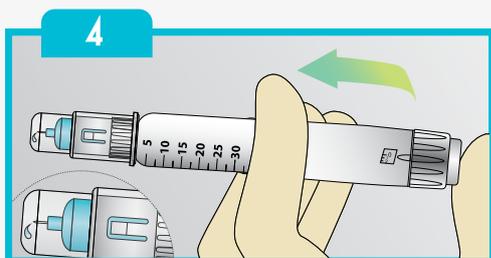


Purgez 2 unités.

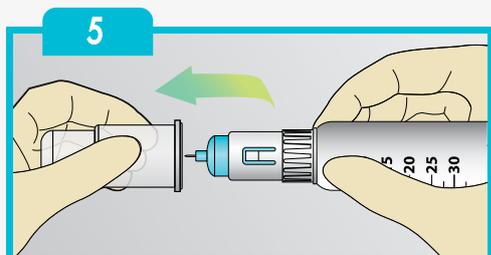


Retirez le capuchon de l'aiguille.

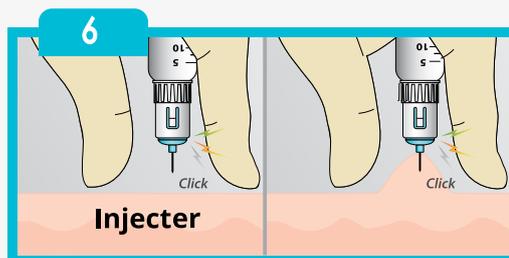


Piquez la peau avec ou sans pli selon la taille de l'aiguille utilisée.

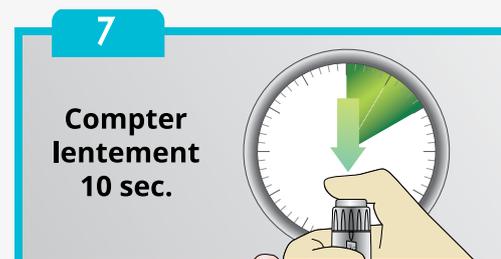


Comptez 10 secondes après avoir appuyé sur le piston.

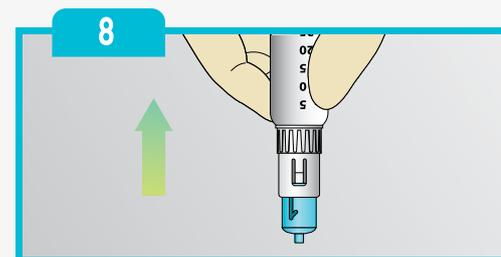

Retirez l'aiguille.

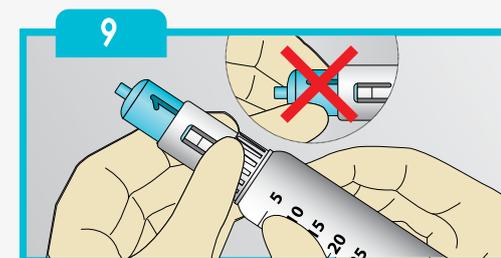

Dévissez l'aiguille du stylo injecteur

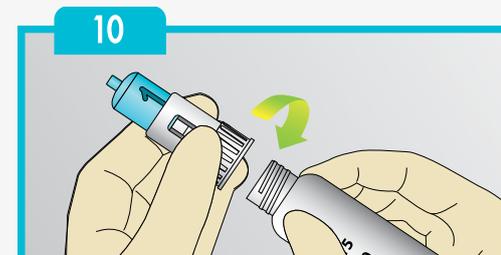


Jetez-la de façon sécurisée dans la boîte de déchets.

# RÉFÉRENCES CATALOGUE

Couleur	Références	Taille	Code ACL
	VERIF4-31	4mm, 31G	6971227400161
	VERIF5-31	5mm, 31G	6971227400178
	VERIF6-30	6mm, 30G	6971227400147
	VERIF8-30	8mm, 30G	6971227400154

## COMPATIBILITE AVEC TOUS LES STYLOS INJECTEURS

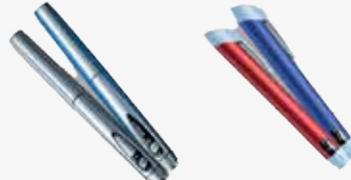	INSULINE		
	Sanofi Aventis	ELI Lilly	Novo Nordisk
STYLOS INJECTEURS JETABLES PRÉEMPLIS	 <p>Solostar :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• APIDRA</li> <li>• LANTUS</li> <li>• TOUJEO</li> </ul>	 <p>KwikPen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HUMALOG</li> <li>• UMILINE</li> <li>• ABASAGLAR</li> </ul>	 <p>FlexPen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Novomix</li> </ul> <p>FlexTouch :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NOVORAPID</li> <li>• LEVEMIR</li> <li>• TRESIBA</li> <li>• XULTOPHY</li> </ul>
	STYLOS INJECTEURS RÉUTILISABLES	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ClickSTAR</li> <li>• JuniorSTAR</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• HUMAPEN SAVVIO</li> <li>• HUMAPEN LUXURA HD</li> </ul>

### ANALOGUE DU GLP-1

ASTRAZENECA	NOVO NORDISK
	
BYETTA	VICTOZA

## DIMENSIONS ET COLISAGE

	Unité	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (Kg)
<b>Boîte</b>	100 Aiguilles	10	10	13	0,362
<b>Colis</b>	12 boîtes (1200 aiguilles)	31,5	22	28,5	4,5
<b>Palette</b>	864 boîtes (86400 aiguilles)	120	80	186	356,4

---

**Importateur en France :**

ALPHADIAB  
381 Avenue Foch  
78670, Villennes s/ Seine,  
France

**Tel :** 01 39 75 51 23

**Fax :** 01 85 47 05 04

**Service client :** [contact@alphadiab.fr](mailto:contact@alphadiab.fr)

**Numéro vert gratuit :** 0805 020 224

---

**Fabricant :**

PROMISEMED HANGZHOU MEDITECH CO.,LTD.  
No. 1388 Cangxing Street, Cangqian Community,  
Yuhang District, Hangzhou City, 311121 Zhejiang, P.R. China  
**Site :** [www.promisemed.ca](http://www.promisemed.ca)

---

**Représentant européen :**

OBELIS S.A  
Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium.MT